

Link do produktu: <https://butterflyhurt.pl/velox-foam-extra-1l-bezalkoholowy-p-493.html>

Velox Foam Extra 1l - bezalkoholowy

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	25,92 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00485
Kod EAN	5907626633405
Producent	Medisept

Opis produktu

Cechy produktu:

- Bezalkoholowa pianka
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Działa już od 1 min. na wirusy, bakterie, grzyby i 5 min. na prątki gruźlicy
- Gotowa do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
- Przyjemny, cytrusowy zapach
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały
- obiciowe – opinia Famed
- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- Daje efekt odświeżenia
- Ekonomiczna w użyciu

Sposób użycia: Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozproszanie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:

0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

Opakowanie:

butelka 1 l ze spryskiwaczem

Zastosowanie: Velox® Foam Extra to pianka zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Zalecana do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu jak np. szkło akrylowe. Posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Spektrum	Normy wg	Obciążenie organiczne
----------	----------	-----------------------

		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 14885 EN 13727	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	3 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Wirus otoczkowe (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Ebola, Vaccina, BVDV, SARS-CoV-2, Herpes simplex)	EN 14476	60 sek.	60 sek.