

Link do produktu: <https://butterflyhurt.pl/velox-top-af-1l-grapefruit-spray-do-mycia-i-dezynfekcji-powierzchni-p-261.html>



Velox Top AF 1L Grapefruit - Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni

Cena brutto	26,99 zł
Cena netto	24,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00208
Kod EAN	5907626633924
Producent	Medisept

Opis produktu

Alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji).

Cechy produktu:

- Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota
- Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, tyżek protetycznych, protez i wycisków
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe – opinia Famed
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

- Gwarancja skuteczności
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- Daje efekt odświeżenia
- Ekonomiczny w użyciu

Sposób użycia: Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie (można przetrzeć jednorazowym ręcznikiem). W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je

wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Produkt wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Skład: 100 g zawiera:

- 40g – propan-2-ol (CAS:67-63-0)
- 20g – etanol
- 0,39g – aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym
- 0,25g – chlorek didecyldimetyloamoniowy

Opakowanie:

butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Zastosowanie: Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Przeznaczony również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy Rota i Adeno.

ZAPACHY:

Grejpfrut
Neutral

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	60 sek.
	EN 13624	30 sek.	
	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex)			
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	60 sek.	

tagi: velox, velodes, medisept, viruton